



Notfalltasche für Dekontamination (Dekon-V)

Anleitung



Schnelle Hilfe bei Unfällen mit gefährlichen Stoffen

Diese Tasche enthält spezialisierte Produkte zur Ersten Hilfe nach Kontakt mit chemischen Gefahrstoffen wie z.B. Säuren, Laugen, Flusssäure etc.

Wichtig: Eigenschutz geht vor! Tragen Sie immer die enthaltene Schutzkleidung, bevor Sie anderen helfen.

Teil 1: Personendekontamination (Haut)

1. SkinNeutrAll® (Lösung 1 & 2)

- **Wofür:** Ein Medizinprodukt zur Ersten Hilfe direkt nach Kontakt mit gefährlichen Chemikalien auf der Haut.
- **Anwendung:**
 1. Die betroffenen Hautbereiche sofort großzügig mit der Sprühvorrichtung einsprühen.
 2. Lösung 1 und Lösung 2 müssen zusammen verwendet werden.
 3. Kurz einwirken lassen und, falls möglich, mit Wasser nachspülen.



2. BodyNeutrAll®-S

- **Wofür:** Zur Dekontamination von Körperoberflächen nach Kontakt mit Säuren, Laugen oder anderen chemischen Gefahrstoffen.



Anwendung unserer Produkte



SkinNeutrAll®



1 Gut gesättigt betroffene Hautflächen benetzen



2 30 Sekunden warten



3 Abspülen



BodyNeutrAll®-S



1 Gut gesättigt betroffene Hautflächen benetzen



2 30 Sekunden warten



3 Abspülen



Teil 2: Augenspülung & Wundreinigung

3. Plum pH Neutral (4,9% Phosphat)

- **Wofür:** Speziell zur Neutralisation bei Verätzungen durch Säuren und alkalische Stoffe im Auge.
- **Anwendung:** Die Flasche (500ml DUO) ermöglicht das gleichzeitige Spülen beider Augen. Sofort nach dem Kontakt anwenden.



4. Plum 0,9% Natriumchlorid

- **Wofür:** Zum Ausspülen von Fremdkörpern wie Staub, Schmutz, Lösungsmitteln oder Ölen.
- **Anwendung:** Das Auge sanft mit der Lösung spülen, bis der Fremdkörper entfernt ist.



5. Wund- und Augenspray

- **Wofür:** Zur schnellen Reinigung und oberflächlichen Spülung von kleineren Wunden oder der Augen bei leichter Verschmutzung. Es wird zusätzlich häufig erfolgreich bei Einsätzen mit Pfefferspray angewendet.



Teil 3: Spezialhilfe bei Flusssäure

6. Calciumgluconat-Gel & Ampullen

- **Wofür:** Lebenswichtige Sofortmaßnahme bei Kontakt mit Flusssäure (Fluorwasserstoffsäure).
- **Anwendung:**
 - **Gel:** Großflächig auf die betroffene Hautstelle auftragen und einmassieren.
 - **Ampullen:** Diese sind für die weitere medizinische Versorgung durch Fachpersonal vorgesehen.



Teil 4: Schutzkleidung (Eigenschutz)

- **Chemikalienschutz-Kittel (TYCHEM® 6000 F):** Schützt den Körper vor Spritzern gefährlicher Chemikalien.
- **Schutzbrille & FFP3 Maske:** Schützen Augen vor Spritzern und die Atemwege vor gefährlichen Stäuben oder Dämpfen.
- **Chemieschutzhandschuhe:** Verhindern den direkten Hautkontakt beim Helfen.
 - **Tipp:** Für maximale Dichtigkeit sollten die Übergänge zwischen Ärmeln und Handschuhen mit Klebeband fixiert werden.



Teil 5: Personenversorgung & Zubehör

- **Mull- & Vlieskompressen:** Zur allgemeinen Erstversorgung, Wundreinigung und zum Aufsaugen von Blut oder Flüssigkeiten.
- **Janosteril Infusionslösung:** Zur medizinischen Flüssigkeitszufuhr oder zum großflächigen Spülen.
- **pH-Indikatorpapier:** Zur schnellen Bestimmung, ob eine unbekannte Substanz sauer oder alkalisch ist.
- **Rettungsdecke:** Schützt den Patienten nach der Dekontamination vor Unterkühlung oder Hitze.
- **Mini-Spike®:** Dient der hygienischen Entnahme von Flüssigkeiten aus Infusionsflaschen.
- **Pinzette:** Zum Entfernen von Kontaktlinsen im Auge.







EST Biochem GmbH

Luchsweg 22, D-50259 Pulheim

Tel.: +49 2238 92999-59

Mail: info@est-biochem.com

Hinweis: Diese Anleitung ersetzt nicht die fachliche Unterweisung. Im Notfall ist immer der Giftnotruf (z. B. Erfurt: +49-361-730730) oder der Rettungsdienst zu informieren.